

# UniGel Procto

Wyrób medyczny

## GDY SIADANIE TO WYZWANIE



1. Use of the medical device Hemagel procto for the treatment of anal fissures, rhagades and haemorrhoids - a comparative study, prepared by MUDr. Pavel Zbořil, ČSN EN ISO 14155, issued in 2012, „Clinical investigation of medical devices for human subjects, Good clinical practice”, Report preparation date: 1.8.2012.

## WSPOMAGA PROCES GOJENIA OSTRYCH I PRZEWLEKŁYCH RAN BŁONY ŚLIZOWEJ ODBYTU I ODBYTNICZY

• SZCZELINY ODBYTU

• HEMOROIDY

• PO ZABIEGU LECZENIA HEMOROIDÓW METODĄ BARRONA (LIGATURA BARRONA)

**ZMNIĘJSZA:**  
KRWAWIENIE, PIECZENIE, SWĘDZENIE



**WSPOMAGA  
PROCES  
GOJENIA**



**DO STOSOWANIA  
TYLKO JEDEN  
RAZ DZIENNIE**



**NIE BRUZI  
BIELIZNY**

### CZOPKI

## UniGel Procto

Wyrób medyczny

#### Opis:

UniGel Procto to wyrób medyczny, który wspomaga proces gojenia zarówno ostrych, jak i przewlekłych ran błony śluzowej odbytu i odbytnicy:

- szczelin odbytu,
- hemoroidów,
- u pacjentów po zabiegu leczenia hemoroidów metodą Barrona (Ligatura Barrona).

#### SKŁAD:

UniGel Procto to biały czopek o kształcie torpedy, zawierający sproszkowany kopolimer HEMA-HAS oraz bazę tłuszczową (*Adeps solidus*).

#### WAŻNE INFORMACJE:

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów. Tylko do użytku zewnętrznego (doodbytniczo). U dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią UniGel Procto można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. W przypadku chorób odbytnicy szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiedniej higieny oraz regularne wypróżnianie się. Konieczne jest przyjmowanie wystarczającej ilości płynów, unikanie spożywania pikantnych potraw oraz zwiększenie spożycia pokarmów zawierających dużo błonnika.

#### SPOSÓB STOSOWANIA CZOPKÓW:

- W miejscu perforacji blistra należy oddzielić jeden czopek od całego opakowania, lekkim szarpnięciem otworzyć jednostkowe opakowanie i wyjąć czopek.
- Czopki wprowadza się do odbytnicy, o ile to możliwe, po wypróżnieniu i podmyciu się.
- Czopek należy włożyć głęboko do odbytnicy, zaostrozonym końcem skierowanym w stronę odbytu, najlepiej w lekkim skłonie w przód.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, czopki UniGel Procto należy stosować raz na dobę, najlepiej przed snem.

#### PRZECIWSKAZANIA:

Nadwrażliwość na składniki produktu, niewystarczająca długość odbytnicy (u dzieci do 3 miesiąca życia lub wcześniaków). Inne przeciwwskazania są względne i dlatego stosowanie czopków należy skonsultować z lekarzem w przypadku wystąpienia: zaparcia, biegunki, poważnej choroby, obfitego krwawienia, po urazach okolic odbytu i odbytnicy, choroby okolicy anorektalnej (np. ropień lub przetoka), resekcji odbytnicy.

#### OSTRZEŻENIA:

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi! Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Niewykorzystany lub przeterminowany produkt należy zwrócić do apteki.

Stosować nie dłużej niż 30 dni. **Jeśli w ciągu 7 dni dolegliwości nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.** Czopek przeznaczony jest do jednorazowego użytku i aplikacji doodbytniczej. Nie stosować do innych jam ciała. Nie polykać. Jeśli wystąpi niewielkie podrażnienie błony śluzowej odbytnicy u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością, np. łagodne swędzenie lub pieczenie, należy skonsultować się z lekarzem.

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w oryginalnym opakowaniu.

**OPAKOWANIE:** 5 lub 10 czopków w blistrach z folii PVC/PE

**DYSTRYBUTOR:** Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa